

Produkty związane z techniką izolacji za pomocą koferdamu.

Instrukcja użycia

Nazwa produktu – kod produktu

KSK Rubber Dam Punch	REF	01021011
KSK Rubber Dam Clamp Forceps	REF	01031040
Rubber Dam Template	REF	08190020
Rubber Dam Frame		
Adult	REF	01022010
Pedo	REF	01022020
KSK Dental Dam		
Medium	REF	01023020
Thin	REF	01023030
Non-Latex	REF	01023040
Non-Latex Powder-Free	REF	01023050
Clamp set		
No. 8, Glossy	REF	01040000
No. 8, Matt	REF	01040080
No. 8, Black	REF	01040050
No. 8 with cassette, Glossy		
No. 8 with cassette, Matt		
No. 8 with cassette, Black		
No. 12, Glossy	REF	01040010
No. 12, Matt	REF	01040090
No. 12, Black	REF	01040060
No. 18, Glossy	REF	01040020
No. 18, Matt	REF	01040100
No. 18, Black	REF	01040070
Deciduous Clamp set		
Glossy		
Matt		
Black		
Deciduous Clamp set with cassette		
Glossy		
Matt		
Black		
MB Rubber Dam Clamp set		
MB Rubber Dam Clamp set Black		
Rubber Dam Technic set		
Glossy		
Matt		
Black		
Rubber Dam Complete set		
Glossy		
Matt		
Black		
Rubber Dam Starter Kit		
Glossy		
Matt		
Black		
Rubber Dam Clamp (Glossy, Matt, Black)		
Molar: 15, 18, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 42, 43, 51, 138, 139, 201, 202, 203, 204, 205, 3, W3, 4, 5, 56, 56A, 7, 7A, 8, 8A, W8A, 10, 11, 12A, 13A, 14, 14A, Bicuspid: 22, 27, 29, 206, 207, 208, 209, 1, 1A, 2, 2A, W2A, 0, 00, Y10 (Matt only)		
Labial: 210, 212, 212SA, 6, 9, 44, 90N		
Deciduous: P-1, P-2, 54, 55, 64, 65, 74, 75, 84, 85		
Tiger: 1T, 1AT, 2T, 2AT, 14T, 56T, 9T		
Others: G-1, G-2, U67		
Distal Clamp (Matt only)		
Clamp Organizer		
No. 8, No. 12, No. 18		
Deciduous		

PRZECIWWSKAZANIA

Klamry:

Nie rozwieraj klamry bardziej niż to absolutnie konieczne, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

KSK Dental Dam:

1) Do jednorazowego użytku. Nie używać ponownie.



2) KSK Dental Dam Medium i Thin wykonane są z naturalnego kauczuku. Kauczuk naturalny rzadko powoduje objawy reakcji alergicznej, takie jak swędzenie, zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęk, gorączka, duszność, reakcja astmatyczna, obniżone ciśnienie krwi i wstrząs. W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.



WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Następujące instrumenty: koferdamy dentystyczne, zaciski do klamer, kleszcze do klamer, ramki do koferdamu itp. są przeznaczone do stosowania w celu zapobiegania zanieczyszczeniem wilgocią lub śliną podczas zabiegów dentystycznych.

ODPOWIEDNI PACJENCI

Produkty do techniki izolacji koferdamem są przeznaczone do stosowania u pacjentów wymagających leczenia kanałowego lub odtwórczego leczenia stomatologicznego.

ODPOWIEDZIALNI UŻYTKOWNICY

Produkt powinien być używany wyłącznie przez wykwalifikowanych stomatologów.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Klamry, dziurkacz do koferdamu KSK, kleszcze do klamer KSK i ramka do koferdamu muszą być sterylizowane w autoklawie przed użyciem. Aby zdezynfekować szablon koferdamu przed użyciem, przetrzyj ściereczką nasączoną alkoholem itp.

- 1) Sprawdź kompatybilność klamry, uważając jednocześnie, aby nie zranić dziąseł. (Aby zapobiec przypadkowemu połamaniu, należy wcześniej przymocować niec dentystyczną do klamry.)
- 2) Użyj szablonu koferdamu, aby zaznaczyć położenie otworów na koferdamie KSK Dental Dam.
- 3) Wybierz rozmiar otworu na głowicy dziurkacza KSK, aby dopasować go do rozmiaru leczonego zęba.
- 4) Użyj dziurkacza do koferdamu KSK do wybijania otworów w koferdamie.
- 5) Przełóż klamrę przez otwór koferdamu i umieść go równolegle do łuku zębowego koferdamu w ramce KSK Dental Dam.
- 6) Użyj kleszczy do klamer KSK, aby przytrzymać klamrę do koferdamu podczas zakładania ramki KSK Dental Dam.
- 7) Umieść klamrę na leczonym zębie, uważając, aby nie przycisnąć dziąseł. W takim przypadku należy podać znieczulenie itp. zgodnie z ogólnymi zaleceniami.
- 8) Wsuń ramkę KSK poniżej gumowego zacisku koferdamu i przymocuj ją do powierzchni zębów nicią dentystyczną.
- 9) Umieścić ramkę koferdamu ostrożnie, tak aby nie utrudniać oddychania pacjentowi.

* Na powierzchni koferdamu KSK Dental Dam mogą znajdować się drobinki lub smugi białego proszku (talku), nie ma to wpływu na jakość koferdamu KSK Dental Dam.

KONSERWACJA

- 1) Przed użyciem sprawdź, czy nie ma brudu, zarysowań, wypaczeń i innych wad..

- 2) Natychmiast po użyciu wypłucz ciało obce, takie jak krew, ślina i roztwór leków. Do mycia nie używaj materiałów ściernych, szorowaczek, wełny metalowej i/lub żadnych metalowych narzędzi.
- 3) Wymień sprzęt, jeśli wykazuje oznaki zmęczenia, zużycia lub jakiegokolwiek innej degradacji metalu.
- 4) Zestaw MB Rubber Dam Clamp można przechowywać w skrzynce na akcesoria kasety sterylizacyjnej do sterylizacji parą.

CZYSZCZENIE RĘCZNE

- 1) Przygotuj detergent zgodnie z zaleceniami producenta.
- 2) Namocz narzędzia w detergencie na czas zalecany przez producenta. Aby upewnić się, że instrumenty są całkowicie zanurzone, użyj strzykawki, aby dotrzeć do wewnętrznych obszarów instrumentów.
- 3) Użyj miękkiej szczotki lub szmatki, aby całkowicie usunąć brud i pozostałości.
- 4) Dokładnie opłucz instrumenty wodą demineralizowaną, aby usunąć pozostałości detergentu.
- 5) Natychmiast osusz instrumenty.
- 6) Sprawdź wzrokowo instrumenty pod kątem zabrudzeń lub osadów. W przypadku zabrudzenia lub pozostałości powtórz kroki od 1 do 5.

DEZYNFEKCJA

Dziurkacz do koferdamu KSK, kleszcze do klamer KSK, ramka do koferdamu, zacisk do koferdamu i kasetę do sterylizacji: Używaj roztworu dezynfekującego innego niż: chlor, roztwór dezynfekujący na bazie jodu, podchloryn sodu, chlorek benzalkoniowy, powidon jod, formalina, fenol, glukonian chlorheksydyny, silnie kwaśna woda i domowe środki czyszczące. W celu zapoznania się ze szczegółowymi metodami dezynfekcji należy postępować zgodnie z instrukcją producenta środka dezynfekującego.

Szablon koferdamu:
Użyj alkoholu dezynfekującego.

STERYLIZACJA

Dziurkacz do koferdamu KSK, kleszcze do klamer KSK, ramka do koferdamu, klamry do koferdamu, zestaw zacisków i kasetę do sterylizacji:

Sterylizacja parowa w 132 °C przez 5 minut lub 121 °C przez 15 minut zgodnie z ISO13402, ISO17664-1.

Szablon koferdamu i koferdam KSK Dental:
Nie można sterylizować w autoklawie.

PRZECHOWYWANIE

- (1) Aby zapobiec korozji, wysusz natychmiast po czyszczeniu i przechowuj w suchym miejscu.
- (2) Przechowywać w czystym miejscu, aby zapobiec zanieczyszczeniu.

OCZEKIWANA ŻYWOTNOŚĆ

Koferdam KSK
Medium, Thin, Non-Latex:
2 lata (zgodnie z datą ważności producenta)
Non-Latex Powder-Free:
5 lat (zgodnie z datą ważności producenta)
* Data ważności jest podana na opakowaniu

OPAKOWANIE

Koferdam KSK:
Aby zabezpieczyć elementy gumowe przed zniszczeniem, produkty należy włożyć do opakowania z folii aluminiowej lub białego pudełka i zamknąć je zamkiem błyskawicznym..

UWAGI

Wszelkie podejrzane incydenty związane z produktem należy zgłaszać producentowi, autoryzowanemu przedstawicielowi w Europie/Wielkiej Brytanii (MDSS/Advena), importerowi lub dystrybutorowi.



Producent:

DENTECH

DENTECH Corporation
53-5, Shimizu-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174-0053, Japan
TEL +81-3-3964-2011
FAX +81-3-3962-5624
HP <https://www.dentech.co.jp/en/contact/>

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

UK REP

Advena Ltd
Pure Offices, Plato Close Warwick
CV34 6WE, United Kingdom