

3 korzyści

1

Doskonała moc czyszcząca
przeciwdziała powstawaniu biofilmu i
nieprzyjemnego zapachu, zapewniając w
ten sposób niezawodne funkcjonowanie
urządzeń ssących.

2

Niezwykłe wydajny kon-
centrat
pomaga ograniczyć koszty i wpływ na
środowisko.

3

Preparat niepieniący
gwarantuje sprawne działanie pompy
ssącej.

PROSEPT® Jet Forte

Mocny koncentrat do czyszczenia urządzeń ssących.

PROSEPT® Jet Forte to płynny koncentrat przeznaczony do pielęgnacji i czyszczenia urządzeń ssących, misek spluwaczek oraz separatorów amalgamatu. Preparat skutecznie usuwa pozostałości krwi, białka i innych osadów dzięki alkalicznym środkom aktywnym. Systematyczny rozkład biofilmu we wnętrzu urządzenia ssącego zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. PROSEPT® Jet Forte nie zawiera substancji agresywnych, takich jak aldehydy lub fenole, zapewniając wysoką kompatybilność materiałową, jak również istotnie wydłużając trwałość węży i urządzeń ssących. Dodatkowo środki przeciwspieniające chronią części mechaniczne, gwarantując sprawne działanie urządzenia ssącego. Składniki PROSEPT® Jet Forte ulegają biodegradacji.

► Dlaczego

PROSEPT® Jet Forte jest tak skuteczny?

Skład: Alkaliczne związki czyszczące, środki przeciwspieniające, specjalne środki powierzchniowo-czynne.

Właściwości fizyczne: Przezroczysta, żółta ciecz o miętowym zapachu.

Gęstość (20°C): 1,1 g/ml (g/cm³)

Wartość pH: Koncentrat: 14,0; 2% roztwór roboczy: 11,0

► Łatwe zastosowanie

zgodnie z prostymi wytycznymi:


1. Ze względów bezpieczeństwa należy nosić rękawice ochronne i okulary ochronne.
2. Przygotować roztwór roboczy zgodnie instrukcją na etykiecie. Użyć podziałki objętości wewnątrz nakrętki, aby zapewnić właściwe dozowanie.
3. Zassać 1,5 litra na jednostkę przy użyciu OROCLEAN® Cup.
4. Spuścić 0,5 litra do miski spluwaczki.
5. Odczekać wymagany czas działania.
6. Dokładnie spłukać unity wodą.

► Ważne

ze względów bezpieczeństwa

Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.



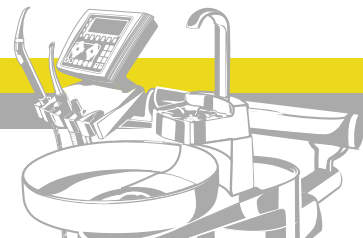

PROSEPT® Jet Forte

Zastosowanie

Płynny koncentrat do niezawodnego czyszczenia urządzeń ssących.

Czyszczenie urządzeń ssących

Kiedy stosować

- ▶ Urządzenie ssące czyścić co najmniej raz dziennie pod koniec dnia pracy.
- ▶ Dokładnie przepłukać urządzenie ssące dużą ilością wody po każdym zabiegu.

Ważne wytyczne

- ▶ Dokładnie przepłukać urządzenie ssące wodą po każdym zabiegu i przed dezynfekcją.

Materiały i wyposażenie

- ▶ OROCLEAN® Cup
- ▶ Rękawice
- ▶ Okulary ochronne



1. Ze względów bezpieczeństwa należy nosić rękawice ochronne i okulary ochronne.



2. Zdezynfekować zewnętrzne powierzchnie węży i złączy (np. przy użyciu PROSEPT® Wipes).
3. Dokładnie spłukać urządzenia wodą.



4. Przygotować roztwór roboczy w pojemniku OROCLEAN® Cup zgodnie z instrukcją na etykiecie. Z 2 litrów roztworu roboczego przygotować dwie nakrętki (40 ml) koncentratu i 1960 ml wody. Użyć podziałki objętości wewnątrz nakrętki, aby zapewnić właściwe dozowanie.



5. Zassać 1,5 litra na jednostkę przy użyciu OROCLEAN® Cup.
6. Spuścić 0,5 litra do miski spluwaczki.



7. Odczekać wymagany czas działania.
8. Dokładnie spłukać urządzenia wodą, aby usunąć oddzielone złoży.



OROCLEAN® Cup