

Instrukcja czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji wszystkich instrumentów



Wszystkie instrumenty do leczenia kanałowego produkowane przez Poldent Sp. z o.o. są niesterylne. Przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym należy je poddać czyszczeniu, dezynfekcji i sterylizacji wg. poniższych wskazówek.

Informacje wstępne	
OSTRZEŻENIE	<ul style="list-style-type: none">• Za sterylność wyrobu zarówno przed pierwszym jak i każdym kolejnym użyciem odpowiada użytkownik.• Dla własnego bezpieczeństwa używaj sprzętu ochronnego np. rękawiczek.• Używaj tylko środków przeznaczonych do czyszczenia lub sterylizacji instrumentów dentystycznych.• Używając chemicznych roztworów do namaczania instrumentów, zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją producenta płynu.• Nadmierne stężenie płynu i zbyt długi czas namaczania (niezgodne z instrukcją producenta płynu) mogą spowodować uszkodzenie instrumentów.• Plastikowe rączki mogą się stopić lub zdeformować w temperaturze powyżej 200°C.
REKOMENDACJA	<ul style="list-style-type: none">• Wielokrotne sterylizowanie instrumentów nie wpływa na ich stan. Żywotność instrumentu uwarunkowana jest częstotliwością jego użycia.• Nie należy przekraczać zalecanej ilości użyc instrumentów.• Instrumenty mogą być dezynfekowane w łagodnych środkach dezynfekcyjnych oraz myte w myjkach ultradźwiękowych.
Instrukcja czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji instrumentów	
Czyszczenie ręczne	<ul style="list-style-type: none">- Usuń ręcznie resztki zębiny, używając miękkiej szmatki.- Spłucz większe zabrudzenia z instrumentu.
Czyszczenie automatyczne	<ul style="list-style-type: none">- Umieść instrumenty w myjce ultradźwiękowej w przeznaczonym do tego koszyczku. Postępuj zgodnie z instrukcją urządzenia.- Używaj urządzenia spełniającego wymogi normy ISO 15883.
Dezynfekcja	<ul style="list-style-type: none">- Zanurz instrumenty w roztworze dezynfekującym, zwróć uwagę na zalecenia producenta płynu odnośnie czasu dezynfekcji.- Płucz pilniki w destylowanej lub demineralizowanej wodzie, aby pozbyć się resztek płynu czyszczącego.- Wyszusz.
Ocena	Dokładnie sprawdź czyszczone instrumenty. Wyrzuć uszkodzone, połamane lub pognięte.
Steryliczacja	<ul style="list-style-type: none">- Wszystkie instrumenty mogą być wielokrotnie sterylizowane w autoklawie parowym w temperaturze 134°C- Zalecany czas sterylizacji 35-40 minut.- Używaj urządzeń spełniających wymogi normy ISO 13060, ISO 285.- Procedurę sterylizacji przeprowadzaj zgodnie z normą ISO 17665.



UWAGA!

Użycie instrumentu więcej razy niż jest to zalecane może spowodować złamanie ostrza w kanale

Dane wytwórcy:

Poldent Sp. z o. o.

Dzika 2

00-194 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 351-76-50 do 51

fax: +48 22 351-76-79

www.poldent.pl, www.endostar.eu, e-mail: poldent@poldent.pl endostar@endostar.eu

Data ostatniej aktualizacji instrukcji: 01.2018