

NOWOŚĆ!

SURFANIOS PREMIUM

Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia.



- szerokie zastosowanie – produkt o podwójnym statusie
- wysoka skuteczność biobójcza w krótkim czasie
- bardzo niskie stężenie roztworu roboczego **0,25 %**
- działanie wobec wirusa Rota
- doskonałe właściwości myjąco-dezynfekujące
- wyjątkowo wysoka wydajność koncentratu – **400 l** roztworu z 1 l koncentratu
- nieograniczona kompatybilność materiałowa



Wyrob medyczny kl. IIa, CE 0459
Produkt Biobójczy – pozwolenie na obrót nr 5470/13



SURFANIOS PREMIUM

AŻ 400 LITRÓW
ROZTWORU ROBOCZEGO

SKUTECZNOŚĆ
WOBEC ROTA

Preparat do dezynfekcji i mycia wszystkich zmywalnych dużych powierzchni, wyrobów medycznych oraz wyposażenia.

PODSTAWOWE CECHY

- możliwość jednoczesnego mycia i dezynfekcji
- szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
- wykazuje dodatkowe działanie bakteriobójcze przeciwko: MRSA, Acinetobacter baumannii ESBL, Enterobacter aerogenes ESBL, Enterobacter cloacae ESBL, Enterococcus faecium VRE, Escherichia coli ESBL, Klebsiella pneumoniae ESBL, Listeria monocytogenes 4b, Salmonella enteritidis
- potwierdzone badaniami działanie wobec wirusa Rota – już w 5 minut
- szerokie zastosowanie – produkt o podwójnym statusie, dzięki czemu może być stosowany do jednoczesnej dezynfekcji dużych powierzchni, jak i powierzchni wyrobów medycznych
- bardzo niskie stężenie roztworu roboczego i krótki czas działania: 0,25 % – 15 minut
- wysoce wydajny i ekonomiczny w użyciu – 400 litrów roztworu roboczego z 1 litra koncentratu
- specjalnie opracowana formuła zapewnia doskonałą kompatybilność materiałową
- może być stosowany w obecności pacjentów oraz na oddziale położniczym i noworodkowym
- polecany do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością oraz do dezynfekcji syfonów
- bardzo dobre właściwości myjące roztworu sporządzonego zarówno w ciepłej, jak i zimnej wodzie
- każda 1-litrowa butelka posiada wbudowany dozownik przelewowy ułatwiający precyzyjne dozowanie preparatu
- po wyschnięciu nie pozostawia smug, zdezynfekowana powierzchnia nie wymaga spłukiwania

SKŁAD

N-[3-aminopropyl]-N-dodecylopropano-1,3-diamina, chlorek didecyloдимetyloamonowy, substancje pomocnicze.

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Wykazuje działanie:

- bakteriobójcze: 0,25% – 5 min. [EN 1040, EN 13727, EN 1276], 0,5% – 15 min [EN 13697] oraz dodatkowe działanie w 0,25% – 15 min przeciwko: MRSA, Acinetobacter baumannii ESBL, Enterobacter aerogenes ESBL, Enterobacter cloacae ESBL, Enterococcus faecium VRE, Escherichia coli ESBL, Klebsiella pneumoniae ESBL, Listeria monocytogenes 4b, Salmonella enteritidis
- prątkobójcze: 0,25% – 60 min., 0,5% – 30 min [EN 14348, EN 14563]
- drożdżakobójcze: 0,25% – 15 min. [EN 1275, EN 13624, EN 1650], 0,5% – 15 min. [EN 13697] oraz grzybobójcze: 0,25% – 30 min, 1% – 15 min
- ograniczone wirusobójcze: 0,25% – 5 min – aktywny wobec: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes [EN 14476] oraz w 0,25% – 15 min. wobec Corona [EN 14476].

SPOSÓB UŻYCIA

- Preparat do użytku profesjonalnego.
- Preparat w koncentracji – stosować po rozcieńczeniu.
- Stosować w zalecanym stężeniu w zależności od wymaganego spektrum biobójczego i zgodnie z zalecanym czasem ekspozycji.
- Odpowiednią ilość koncentratu dodać do odpowiedniej ilości wody. Aby uzyskać 0,25 % roztwór roboczy należy rozcieńczyć 2,5 ml koncentratu na każdy 1 l wody.
- Przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchnie zmywać dokładnie za pomocą ścierek i mopów nasączonych roztworem roboczym preparatu. Dezynfekcję dużych powierzchni przeprowadzić stosując metodę dwóch wiader lub mopa jednego kontaktu.
- Przedmioty, które można zanurzać – dezynfekować również poprzez zanurzenie.
- Po naniesieniu preparatu na powierzchnie odczekać minimum 15 minut.
- Po użyciu nie zaleca się spłukiwania powierzchni wodą, z wyjątkiem powierzchni mających kontakt z żywnością, które należy zmyć dokładnie wodą zdatną do picia.

Produkt biobójczy Surfianos Premium należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

OPAKOWANIA

- SURFANIOS Premium: butelka – 1 L
- SURFANIOS Premium: kanister – 5 L
- Wyposażenie dodatkowe: pompka dozująca 20 ml dostosowana do kanistra 5 L

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR

WYTWÓRCA: Laboratoires Anios, Francja

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE: Medilab Sp. z o.o. • ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok
tel./fax.: 85 747 93 53/28 • www.medilab.pl

